

販売店からのご提案

あなたにおすすめの補聴器は

左：WH-

(本カタログP. 〃)

右：WH-

(本カタログP. 〃)

聞こえのお役立ち情報、満載！

パナソニック補聴器ホームページ

panasonic.jp/hochouki

◎ホームページの内容及びデザインは予告なく変更する場合があります。

電池

PR44

PR44 (空気亜鉛電池)

6個入りパック

希望小売価格 1,815円

1.4 V

PR48

PR48 (空気亜鉛電池)

6個入りパック

希望小売価格 1,452円

1.4 V

PR41

PR41 (空気亜鉛電池)

6個入りパック

希望小売価格 1,452円

1.4 V

PR536

PR536 (空気亜鉛電池)

6個入りパック

希望小売価格 1,815円

1.4 V

記載内容は2024年4月現在のものです。

●電池品番の「PR」は「空気亜鉛電池ボタン型」を意味しています。

●使用済みのボタン電池は、回収協力店までお持ちください。

詳しくは、ボタン電池回収サイト (<http://botankaishu.jp/m/top.php>) をご覧ください。

補聴器の効果を発揮するため、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。しかし装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

オーダーメイド補聴器

オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、形状の作り替えを無料で行います。(購入後120日以内)
・オーダーメイドイヤチップWH-PF17、PF20の場合、形状の作り替え(無料)は購入後90日以内です。

補聴器をお買い上げになる前に、
次のような経験をお持ちの方は、耳鼻咽喉科医に、
補聴器使用についてご相談ください。

1.耳だれ、耳の痛み、めまい、耳鳴りなどの自覚症状がある。

2.聴力が急激に変化した。

3.過去に耳の手術をしたことがある。

4.耳あかが大量に出る、またはそのような体質である。

その他使用上のご注意

①適切な音量でご使用ください。②使用しないときは、電源を切りましょう。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、騒音の多い場所でのご使用、また耳の近くで突然大きな音を出すことはおやめください。補聴器の故障や耳に悪影響を及ぼす場合があります。

愛情点検

定期的に販売店に点検をご依頼ください。

補聴器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

こんな症状はありませんか

●電源プラグが異常に熱い。●煙が出たり、異常なおいや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。●補聴器・イヤチップに耳あかがつまっていませんか。●耳かけ型補聴器のチューブに水滴がたまっていませんか。

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切ったあと、コンセントからACアダプターを抜いて(充電式の場合)、必ず販売店に点検をご相談ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店

詳しくはこちら

パナソニック補聴器相談センター

月～金曜日(祝日・年末年始、お盆を除く) 受付9時～17時30分

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-045-285

携帯電話からでもご利用いただけます。

ご相談窓口におけるお客様の
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保管ください。
なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか
お確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店どうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック補聴器相談センターに
おたずねください。

パナソニック補聴器株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2024年4月1日

HI-132

Panasonic

補聴器
総合カタログ
2024/VOL.2


つながろう、
あたらしい世界と。

人と人をつなぐ

パナソニックの補聴器


本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置費、工事費、増設工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

まずはご自分の「聞こえ」を知ることから、はじめましょう

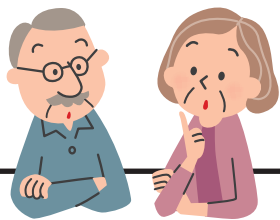



どのくらい聞こえているのか、よく分からないのですが？

→ 普段の生活を振り返り、チェックしてみましょう。

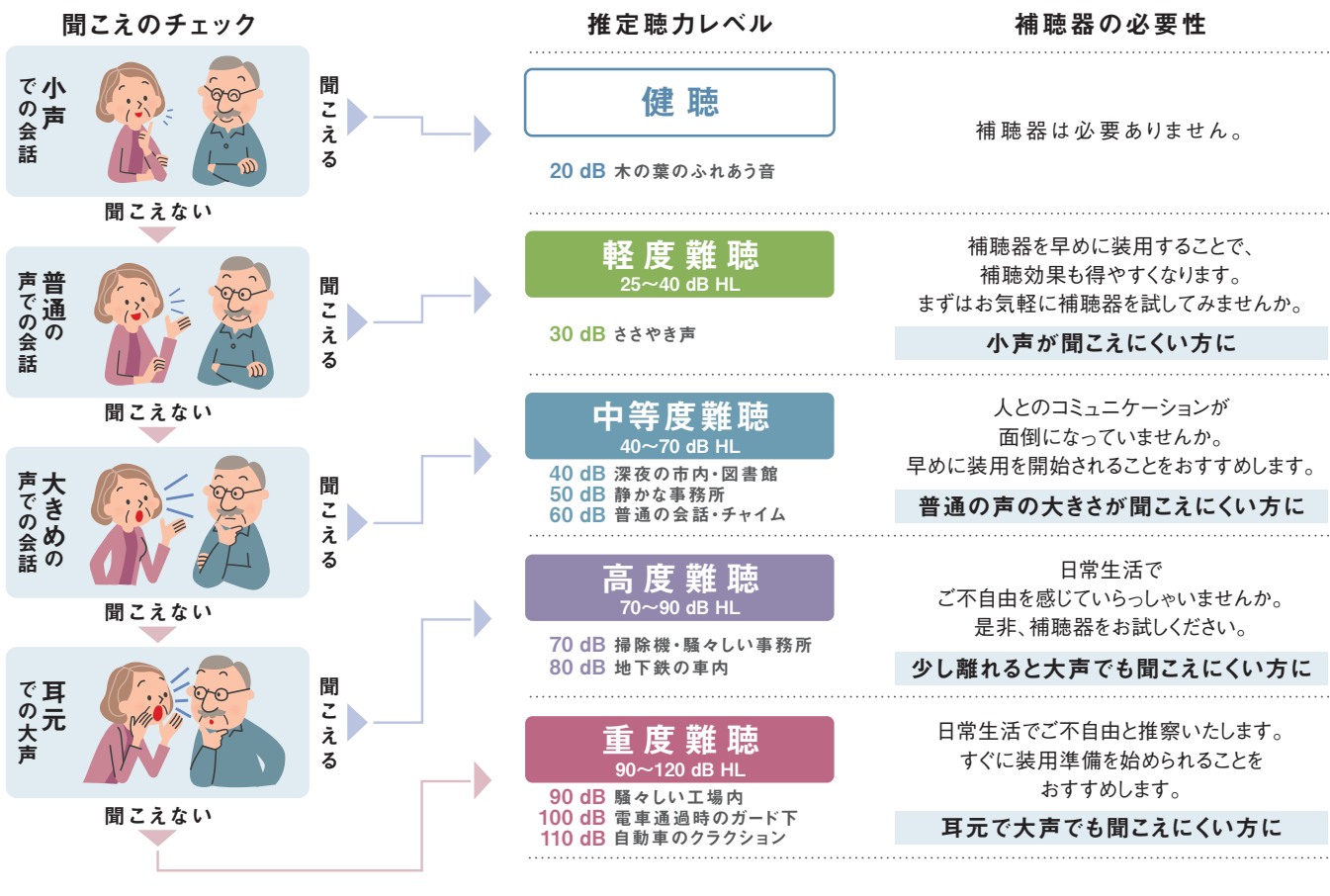

なぜ聞き取りにくくなるのですか？

→ 原因は大きく分けて3つあります。

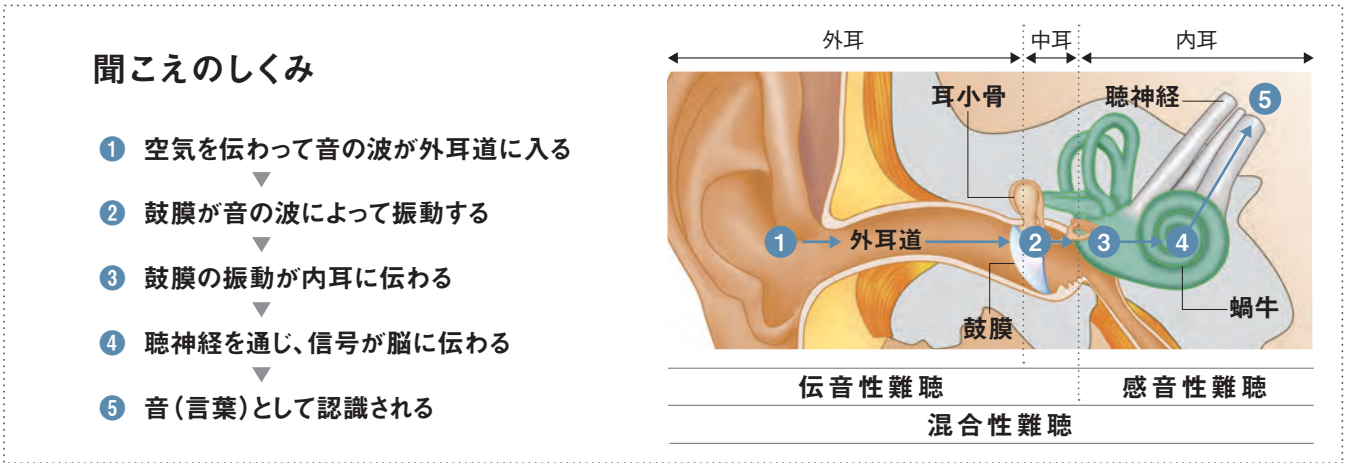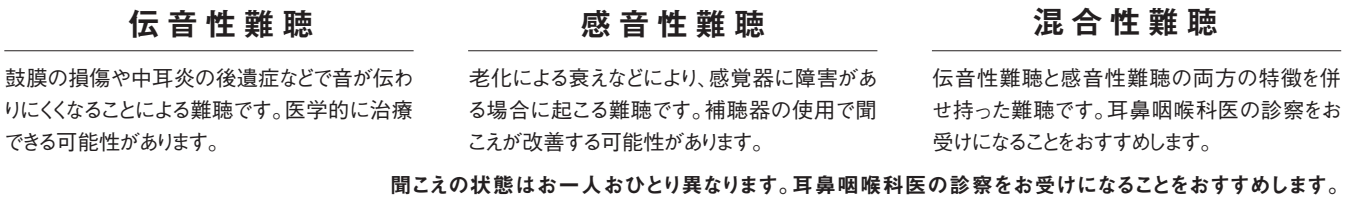


聞き取りにくくなるのは誰にでもあることでしょうか？

→ 聴力は40歳前後から、弱まると言われています。聞こえの変化は、どなたにでも起こり得ることで。

加齢に伴う聴力変化

横軸の数字は音の高さ(ヘルツ)を表しています。横軸の左から右へ行くほど音が高くなります。縦軸の数字は音の大きさ(デシベル)を表しています。0デシベルは正常な方が聞くことの出来る最小の音で、数値が大きくなるほど大きい音でないとも聞こえないことを示します。25デシベル以下が正常の範囲です。

参考文献
「よくわかる難聴」
出版社：金原出版 著者：立木 孝先生
※日本人聴力の加齢変化の研究、立木 孝、他、
Audiology Japan 45, 241~250, 2002

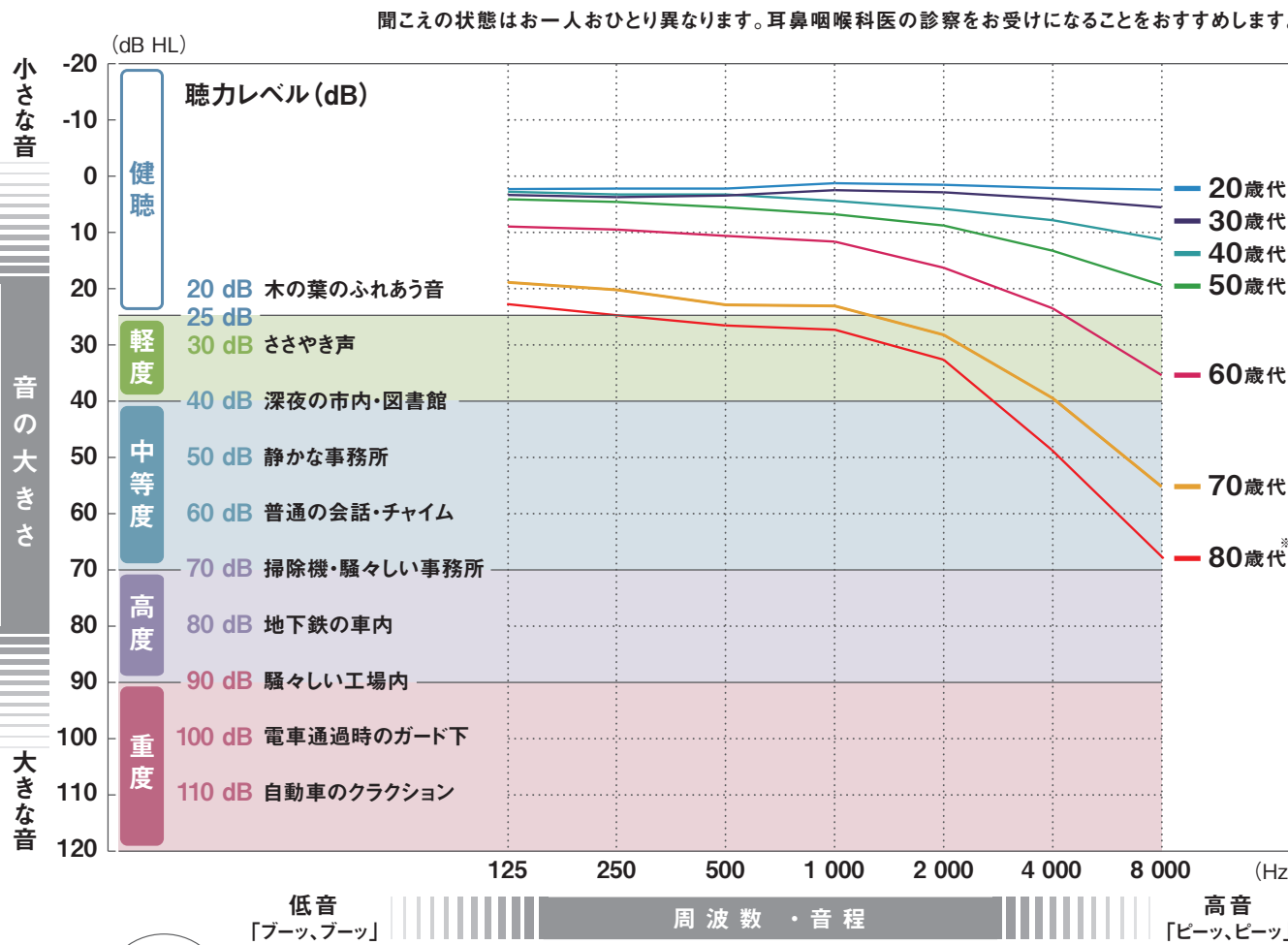

納得のいくまで、ご自分に合った補聴器 をお選びください

カウンセリングから点検まで、安心してご納得・ご購入いただける—8つのステップ

① カウンセリング



聞こえにくいと感じる場面などをお尋ねします。より適した補聴器を選ぶため、お困りごとやお悩みを率直にお聞かせください。

② 聴力測定



どのくらい小さな音まで聞こえるか、言葉の聞き取り具合はどうかなど、聞こえの状態を詳しく測定します。

③ 試聴



補聴器を実際に装着してつけ心地、音の大きさ、ピーピー音がないか、ご自身の声の違和感、周囲の雑音の違和感などをご確認いただきます。

④ 測定結果の説明



聴力レベルをもとに聞こえの状態をご説明します。ご自分の聞こえの状態をきちんと知っていただくことが大切だと考えています。

⑤ 補聴器選び



聞こえのレベル、ご希望やご予算に合わせて、さまざまな機種の中からあなたにより適した補聴器をご提案します。

⑥ 調整・ご購入




同じ機種の補聴器でも、お一人おひとりの調整は異なります。あなたにより適した状態に調整してからご購入いただきます。

⑦ 再調整



日常生活の中で、お気づきになる点があるかもしれません。ご希望に応じて再調整いたしますので、お気軽にご来店ください。

⑧ 定期点検

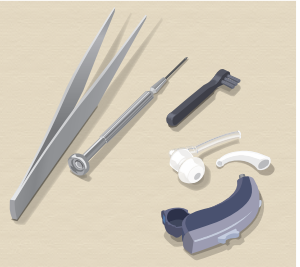


ご購入後は、電池交換、音質調整、掃除などが必要になります。より快適に長くお使いいただけるよう、お手入れいたします。

より自然な聞こえには 両耳装用をおすすめします

メガネも片側だけでは上手く機能しないように、補聴器も両耳装用がおすすめ。片耳に比べて、聞こえの機能をより引き出すことができます。

両耳装用の良さをさらに引き立たせる
ダイコティック補聴処理技術

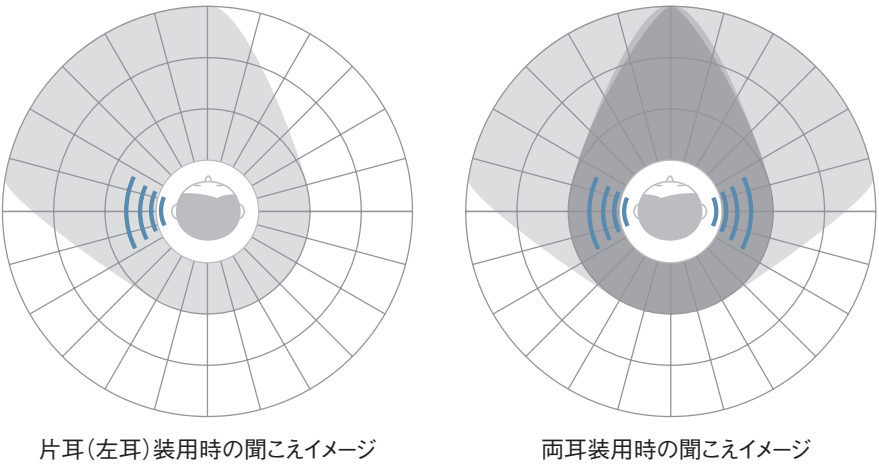

(((両耳で聞くから)))

音の臨場感が
ちがう

音を立体的にとらえることができ、より自然で臨場感豊かな世界が広がります。

騒音下でも
会話しやすい

雑踏での会話、銀行や病院で呼ばれる時など、騒がしい場所でもより聞き取りやすくなります。

耳への負担、
ストレスを低減

片耳装用に比べて補聴器の音量を上げなくても聞きやすく、疲れにくくなります。

車の接近も
わかりやすい

音の方向感や距離感がつかみやすいので、車の接近などもわかりやすくなります。

はっきりしない単語も聞き取りやすい 両耳の良さをさらに引き立たせる「聞き取りサポート」機能搭載

通常の両耳補聴の聞こえ



「聞き取りサポート」機能の聞こえ
(ダイコティック補聴処理技術)



ダイコティック補聴処理技術

パナソニックは、左右の耳で母音と子音を分担して聞くことで、言葉の聞き分けを助ける機能を開発しました。
● 効果には個人差があります。● 片耳装用の場合には使用できません。

「音は聞こえるが、言葉がはっきりしない」
という方におすすめします。



対象品番	
R5 シリーズ	WH-R59、R57、R55、R53
C5 シリーズ	WH-C59、C57、C55、C53
G4 シリーズ	WH-G47、G45、G43
R4 シリーズ	WH-R47、R45、R43

B1 シリーズ	WH-B17C、B15C、B14B、B13C/A、B12A
C1 シリーズ	WH-M17A、M15A、M13A、C17A、C15A、C13A、F17A、F15A、F13A
J2S	WH-J25D-S

充電式
耳かけ型
R5 シリーズ NEW

≫ P.7～13

より心地よい装着感と
やさしさをカタチに

先進性とやさしさを兼ね備えた新しいカタチに、髪色や肌なじみが良い4色、ファッショナブルで活動的な2色をラインナップ。身に着けるアイテムとしてより心地良いものを目指しました。




スモーキーブラック
Smokey black




アッシュブラウン
Ash brown



サンドベージュ
Sand beige

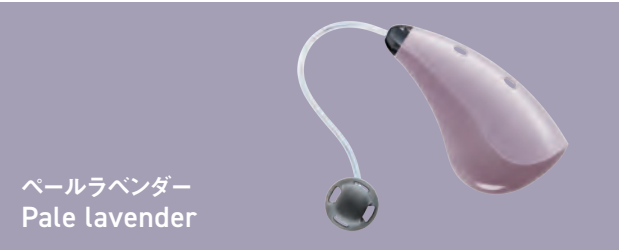

パールラベンダー
Pale lavender

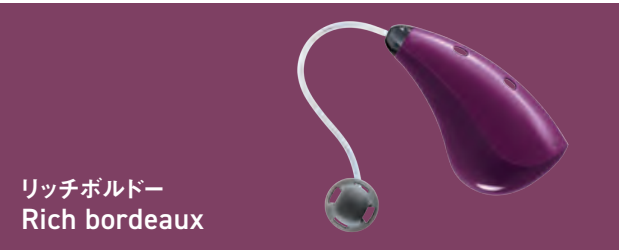

リッチボルドー
Rich bordeaux



アズールブルー
Azur blue

充電式 オーダーメイド
耳あな型
C5 シリーズ NEW

≫ P.7～12・P.14

ファッショナブルで
ユニセックスなスキンカラー

着けていることをもっとポジティブに感じる新デザインを採用。
肌なじみが良く目立ちにくい色でありながら、ものとしてバリューのある存在感を放ちます。



スモーキーブラック
Smokey black



アッシュブラウン
Ash brown

パナソニック初
充電式
オーダーメイド



充電式
耳あな型
G4 シリーズ

≫ P.10～12・P.15

持ちやすく耳に着けやすい

グリップ部分をつまんでより簡単に装着できます。角がなく温かみを感じられる本体デザインを採用。
両耳モデルには気分やファッションに合わせてコーディネートできる、8つのカラーのストラップをお選びいただけます。



充電式
ポケット型 J2S

≫ P.19～20

テレビ・電話・ドアホンとつながる
おうち補聴器



充電式補聴器の特長

毎月の電池交換が不要

本体内に充電電池を内蔵。小さな電池を交換する面倒がなく、電池を買い忘れる心配もありません。

毎日の乾燥が不要

面倒な乾燥の手間がなく、サッと片付けられてすぐに使えます。乾燥剤の交換も不要です。

充電はケースに入れるだけ※1

ケースに入れるだけで簡単に充電。夜、寝ている間にできて便利です。

密閉構造で故障しにくい※1

密閉ボディだから中に汗が入りにくく、故障しにくい構造です。

※1 充電式ポケット型 J2Sは除く。

聞こえの進化で もっとつながる


R5 / C5 シリーズ



にぎやかな場所でも 話したい人との会話がより聞き取りやすい

ボイスフォーカス NEW (WH-R59、C59のみ搭載)

マイクの集音範囲を絞ることで騒音下でも相手の声を聞き取りやすくする指向性処理。新開発の「ボイスフォーカス」機能は、従来機種に搭載している指向性処理に比べて後ろや横からの音声をより強く抑えられるので、レストランや雑踏などの騒音下でも相手の声がより聞き取りやすくなります。

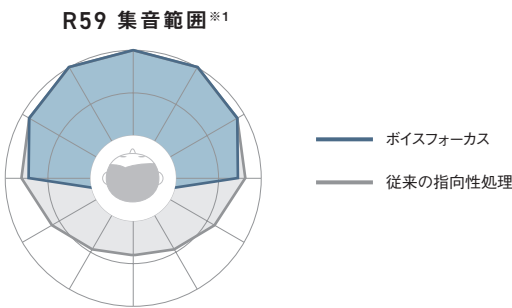

後ろや横からの
音声をカットして
正面からの会話を
際立たせる

※1 【集音範囲測定方法】
指向性処理以外の機能はすべて無効とし、各方向からの音圧レベルをボイスフォーカスおよび当社従来のカーディオイド指向性を用いて測定
●当社調べ (WH-R59で測定し、2kHzの成分を図示) ●集音範囲は使用条件によって変わります

テレビやスマホ、タブレットとつながり、 動画や音楽をより良い音で楽しめる

スマホ・タブレット連携※1 NEW

スマホやタブレットと補聴器が直接つながるので、動画や音楽をより良い音で楽しめます。

テレビアダプター NEW

進化したテレビアダプターは、より高音質で複数の補聴器と同時に接続可能。テレビと補聴器をつなぎ、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビアダプター
R5/C5シリーズ専用
WH-PM1304J※2




広帯域 NEW

当社従来機種に比べて広範な周波数帯域をカバー。音の表現力を高め、動画や音楽のニュアンスをよりクリアに表現します。



動画や
音楽を
楽しめる

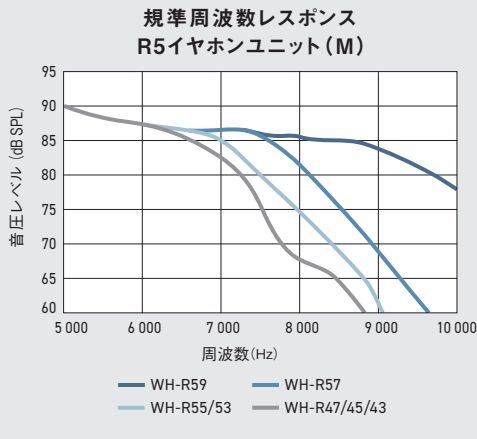

スマホと直接つながるから よりクリアな音声で電話が楽しめる

スマホ通話※1 NEW

スマホと直接つながることで、補聴されたよりクリアな音声で電話を楽しむことができます。

●屋外や周囲音のある場所での通話の際は、スマホのマイクに口元を近づけて通話ください。

電話の音が
よりハッキリ
聞こえる



マスク越しでも 相手の声がより自然で聞きやすい

マスクモード NEW

マスクの影響で損なわれる言葉の明瞭性を補うモードを搭載。マスクをした相手の声がより聞き取りやすくなります。

マスク越しでも
聞きやすい



※1 iOS14以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touchに対応しています。AndroidについてはLE Audioに準拠したスマホ、タブレットに対応。補聴器のアップデートにより今後連携が可能となります。※2 WH-R59、R57、R55、C59、C57、C55に同梱。

毎日使うからより快適に、 使いやすいものを

R5 / C5 シリーズ



たっぷり使える電池持続時間 電池残量はアプリと音声ガイドでお知らせ

電池長持ち NEW
一回の充電^{※1}で、より長時間の使用が可能に。
朝から夜まで安心してお使いいただけます。

	R4	NEW R5	NEW C5
補聴動作	約24時間	約36時間 ^{※2}	約28時間
テレビ視聴	約8時間	約12時間 ^{※2}	約10時間

●動作時間は、使用条件または補聴器の設定によって変わります。

NEW
スマホアプリで電池残量がひと目で分かるから安心です。

充電が少なくなっています
充電してください

補聴器を装着する時に装着中の補聴器本体から電池残量に応じて音声ガイドでお知らせ。

ケースに入れるだけで、かんたん充電 キャリングケースとしても使える

充電ケース
コンパクトでありながらも手に馴染む
上質なデザインの充電ケース。
置くだけ充電なので、
出し入れがかんたんです。



R5シリーズ充電ケース

C5シリーズ充電ケース

NEW
USB充電対応
(Type-A - Type-C)

NEW
色弱者の方でも視認性の良い
2色のLEDで充電状態を表示

充電完了
充電中



R5 / C5 / G4 / R4 シリーズ 共通の特長

スマホアプリで音量調整、 紛失した補聴器の探索もできる

アプリについて
詳しくはWEBへ



スマートリモコン (スマホアプリ)

スマホで音量調節や紛失した補聴器の探索などができる便利なアプリケーションです。

アプリでつながる

音量調整・モード選択



補聴器を探す



ご自宅など
近いところを探す

離れた
ところを探す

※1 R5シリーズ充電時間:約4時間、C5シリーズ充電時間:約3時間。
※2 R5シリーズ:イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。

R5 / C5 / G4 / R4 シリーズ 共通の特長

直感的に使える
スティックタイプのリモコン

音量調節は使いやすい「回す」タイプ。
LEDの光で音量もひと目で分かり、
テレビ視聴への切替えも簡単に行えます。

※P.21～22【無線機器使用上の注意事項】を参照。

- ブラウン：R5 シリーズ用
- ブラック：C5 シリーズ用
- ホワイト：G4/R4 シリーズ用



汗、水、湿気、ホコリに強く故障しにくい

IP*防水・防塵の国際保護等級

補聴器は、直接肌に触れた状態で毎日長時間お使いいただくため、汗や湿気が原因で故障することがあります。補聴器をより良い状態でお使いいただけるよう、従来より汗・水やホコリに強い製品の実現に取り組んでいます。

防水・防塵
国際保護等級
IP68

R5 シリーズ
C5 シリーズ
R4 シリーズ

防水・防塵
国際保護等級
IP57

G4 シリーズ

*IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。

密閉構造で
故障しにくい

汗対策を強化(当社従来品比)

NEW (R5シリーズ)

汗やホコリにより強い新構造を採用

横向きマイク孔

完全防水ではありません。 補聴器を水や液体に浸したり洗ったりしないでください。補聴器内部に水が入ることがあるため、ぬれた時には良く乾燥させてから使用してください。

R5 / G4 / R4 シリーズ用

耳あか詰まりに
より強いイヤチップ

耳あかをブロック
する蓋構造



黒いイヤチップで
耳あかがよく見える




聞きやすさを追求した信号処理で、より快適な毎日を

「おまかせシーンセレクト」機能 (WH-R53、C53、G43、R43は除く)

周囲の環境に合わせて騒音を抑え、「聞こえ」を自動調節

周囲環境を
自動で判断

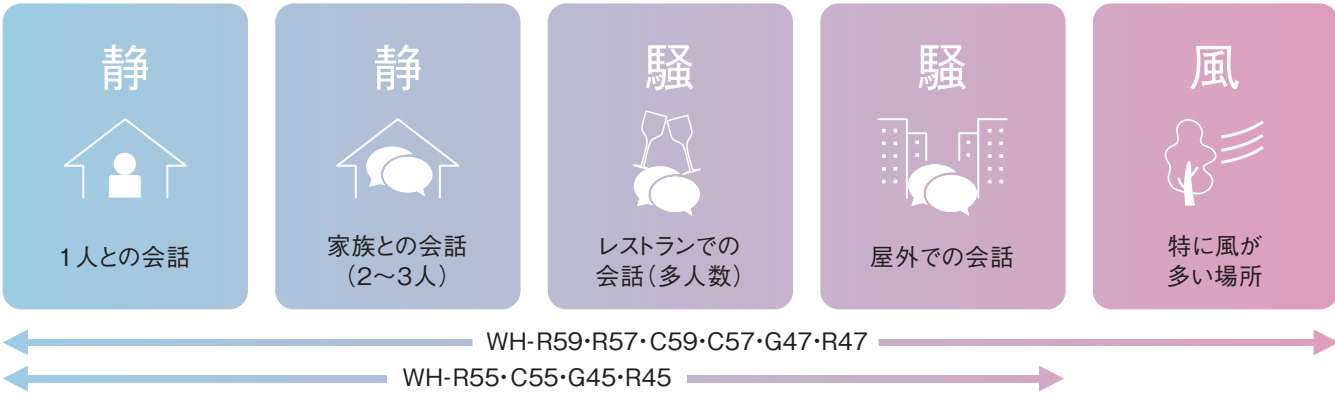

ハウリング抑制 (ICA)※1

「ピーピー」という不快なハウリングだけを独立して抽出し、素早く抑制します。楽器音とハウリングをより高精度で識別し、音楽がより聞きやすい設定を選べます。

突発音抑制 (ISS)※2

突発音を抑制する専用の機能を搭載。言葉の聞こえはそのままに、食器などのカチャカチャ音だけを小さくすることができます。

風雑音抑制 (WNR)※3

音をリアルタイムに分析して風雑音を検出する機能を搭載。ポコポコと聞こえる不快な音を抑えて、屋外での快適性を高めることができます。

ワイヤレスでテレビを
高音質のまま楽しめる連携機能※4

テレビとの接続例

テレビ

テレビアダプター

ワイヤレス

補聴器

R5 シリーズ	WH-R59、R57、R55、R53
C5 シリーズ	WH-C59、C57、C55、C53

接続簡単、テレビアダプターはテレビにつながだけで、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビアダプター
R5/C5シリーズ専用
WH-PM1304J※5
希望小売価格 **33,000円**(税込)

※1 Independent Component Analysisの略。※2 Impulsive Sound Suppressionの略。※3 Wind Noise Reductionの略。
※4 P.21～22【無線機器使用上の注意事項】を参照。※5 WH-R59、R57、R55、C59、C57、C55に同梱。WH-R53、C53は別売。

●記載内容は2024年4月現在のものです。 12

ラインナップ・主な特長
R5・C5
充電式
G4・R4
充電式
電池式
B1・C1
充電式
J2・S
充電式
ポケット型
アナログ
A2
ポケット型
補聴器のかたち
主な機能
愛用いただくために
別売品
ラインナップ

11

充電式 **NEW**

耳かけ型 **R5** シリーズ

耳の後ろに隠れて
目立ちにくい

先進的でありながら、心地よく快適な「やさしい」カタチ

スモーキーブラック (-K) アッシュブラウン (-T)
サンドベージュ (-C) ペールラベンダー (-P)
リッチボルドー (-V) アズールブルー (-A)

髪色や肌なじみが良い4色、
ファッショナブルで
活動的な2色の6色展開
ソリッドなツートーンカラーで
奥行きと深みのある質感

耳の後ろに隠れる小型タイプ
スリムなフォルムで、メガネや
マスク時でも邪魔になりにくい。

充電はケースに入れるだけ

適応難聴度

ミドル (M) タイプ
軽 中 高 重
~85 dB HL
ハイパワー (HP)
軽 中 高 重
70~105 dB HL
防水・防塵
国際保護等級
IP68
2年間
保証
スマートリモコン対応

R5 シリーズ ラインナップ	声も、音楽も、動画も妥協しない パナソニックがお届けする最高品質 プレミアム	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	24ch	20ch	16ch	12ch
モード数	6	5	4	3
スマホ通話	◎	◎	◎	◎
スマホで動画・音楽視聴	◎	◎	◎	◎
広帯域 (kHz)	9.5 (M)、7.5 (HP)	8 (M)、7 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)
テレビアダプター	同梱	同梱	同梱	別売
ボイスフォーカス	◎	—	—	—
おまかせシーンセレクト	◎	◎	○	—
マスクモード	◎	◎	◎	—
ハウリング抑制	◎	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	◎	○	△
充電電池交換無償対応※1	1回	1回	1回	—
耳かけ型 R5 シリーズ 希望小売価格※2	WH-R59 両耳 1,200,000円 (W-※)※3 片耳 650,000円 (Z-※)※3	WH-R57 両耳 898,000円 (W-※)※3 片耳 498,000円 (Z-※)※3	WH-R55 両耳 698,000円 (W-※)※3 片耳 398,000円 (Z-※)※3	WH-R53 両耳 498,000円 (W-※)※3 片耳 328,000円 (Z-※)※3

※1 充電電池交換＋クリーニングサービス（片耳27,500円、両耳55,000円（税込）） WH-R59、R57、R55は、充電電池を1回のみ無償で交換いたします。 ※2 両耳、片耳は補聴器・リモコン・充電ケース・テレビアダプター（WH-R53を除く）のセット価格です。 R5シリーズ ハイパワー（HP）にはオーダーメイドイヤチップWH-PF20が装着されます。（片耳 12,000円、両耳 24,000円（非課税）） ※3 品番の※には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2024年4月現在のものです。

充電式 **NEW**

オーダーメイド
耳あな型 **C5** シリーズ

一人ひとりにぴったりの
オーダーメイド※1

ファッショナブルでユニセックスなスキンカラー

スモーキーブラック (-K) アッシュブラウン (-T)

シックなクリアブラックシェルを
採用した新デザイン

一人ひとりの耳の形に
合わせて製作
耳あなにフィットする、
より自然な着け心地

耳型採取

充電はケースに入れるだけ

適応難聴度

ミドル (M) タイプ
軽 中 高 重
~85 dB HL
ハイパワー (HP)
軽 中 高 重
70~105 dB HL
防水・防塵
国際保護等級
IP68
2年間
保証
スマートリモコン対応

C5 シリーズ ラインナップ	声も、音楽も、動画も妥協しない パナソニックがお届けする最高品質 プレミアム	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	24ch	20ch	16ch	12ch
モード数	6	5	4	3
スマホ通話	◎	◎	◎	◎
スマホで動画・音楽視聴	◎	◎	◎	◎
広帯域 (kHz)	9.5 (M)、7.5 (HP)	8 (M)、7 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)
テレビアダプター	同梱	同梱	同梱	別売
ボイスフォーカス	◎	—	—	—
おまかせシーンセレクト	◎	◎	○	—
マスクモード	◎	◎	◎	—
ハウリング抑制	◎	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	◎	○	△
充電電池交換無償対応※2	1回	1回	1回	—
耳あな型 C5 シリーズ 希望小売価格※3	WH-C59 両耳 1,224,000円 (W-※)※4 片耳 662,000円 (Z-※)※4	WH-C57 両耳 922,000円 (W-※)※4 片耳 510,000円 (Z-※)※4	WH-C55 両耳 722,000円 (W-※)※4 片耳 410,000円 (Z-※)※4	WH-C53 両耳 522,000円 (W-※)※4 片耳 340,000円 (Z-※)※4

※1 お一人おひとりの耳に合わせて作りますので、形状や部品配置が写真と異なる場合があります。 ※2 充電電池交換＋クリーニングサービス（片耳27,500円、両耳55,000円（税込）） WH-C59、C57、C55は、充電電池を1回のみ無償で交換いたします。 ※3 両耳、片耳は補聴器・リモコン・充電ケース・テレビアダプター（WH-C53を除く）のセット価格です。 ※4 品番の※には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2024年4月現在のものです。

充電式
補聴器
主な特長
R5・C5

充電式
G4 R4

電池式
B1 C1

充電式
ボケット型
J2 C5

アナログ
ボケット型
A2

補聴器のかたち
主な機能

ご愛用いただくために

別売品

ラインナップ

充電式
耳あな型 **G4** シリーズ

持ちやすく
耳に着けやすい

角がなく親しみやすい、
やさしいかたち

ホワイト (-W) ダークグレー (-H) ベージュ (-C)

付属ストラップ (両耳モデル用)

○ ホワイト

● ダークグレー

● グレー

● 同梱のリモコン、キャリングケース、充電ケースの色はホワイトです。

持ちやすく、耳に入れやすいかたち

グリップ部分をつまむだけで上下方向と耳への挿入方向がわかりより簡単に装着できます。

GOOD DESIGN AWARD 2017 受賞

充電はケースに入れるだけ

適応難聴度

軽

中

高

重

～80 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP57

2年間
保証

スマートリモコン対応

8色の“着替え”も楽しめる
スポーティなストラップ

[別売品]
希望小売価格 2,178円／各色(税込)

G4 / R4 シリーズ 共通の特長

インテリアのように日常に溶け込み
かんたんに使える充電ケース

G4 シリーズ用

R4 シリーズ用

充電時間	約3時間
動作時間	補聴器として 約24時間 テレビ視聴※1 約 8時間

R4 シリーズ ハイパワー (HP) の場合
補聴器として 約20時間
テレビ視聴※1 約 4時間

※1 別売品のテレビアダプター (WH-0M1303J) を使用した場合

G4 シリーズ		
LED表示		充電中 充電完了

R4 シリーズ
(充電ケースに入れるだけで充電状態がわかります。)

LED表示		1/3充電完了 2/3充電完了 3/3充電完了
-------	---	-------------------------------

・動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。

ワイヤレスでテレビを
高音質のまま楽しめる連携機能※2

接続簡単、テレビアダプターはテレビにつなぐだけで、
家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビとの接続例

テレビ テレビアダプター 補聴器

[別売品]
テレビアダプター G4/R4シリーズ専用
WH-0M1303J
希望小売価格 21,780円(税込)

※2 P.21～22 【無線機器使用上の注意事項】を参照。

充電式
耳かけ型 **R4** シリーズ

耳の後ろに隠れて
目立ちにくい

ファッションやライフスタイルに
合わせて選べる

ホワイト (-W) ブラウン (-T) ダークグレー (-H) ベージュ (-C) ピンクベージュ (-P)

GOOD DESIGN AWARD 2017
グッドデザイン 金賞
IAUD 2017 金賞

充電はケースに入れるだけ

適応難聴度

スリム (S) タイプ

軽

中

高

重

～70 dB HL

ミドル (M) タイプ

軽

中

高

重

～85 dB HL

ハイパワー (HP)

軽

中

高

重

70～105 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP68

2年間
保証

スマートリモコン対応

G4 / R4 シリーズ ラインナップ	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	16ch	12ch	9ch
メモリ数	5	5	4
ハウリング抑制	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	○	△
おまかせシーンセレクト	◎	○	—
テレビ／音楽モード	◎ テレビ／音楽モード	◎ テレビ／音楽モード	○ テレビモード
充電池交換チケット※1	○	○	—
耳あな型 G4 シリーズ 希望小売価格※2	両耳 869,000円 (W-※)※3 片耳 484,000円 (L-※/R-※)※3	両耳 649,000円 (W-※)※3 片耳 363,000円 (L-※/R-※)※3	両耳 437,800円 (W-※)※3 片耳 247,500円 (L-※/R-※)※3
耳かけ型 R4 シリーズ 希望小売価格※2	両耳 869,000円 (-※ZW)※3 片耳 484,000円 (-※Z)※3	両耳 649,000円 (-※ZW)※3 片耳 363,000円 (-※Z)※3	両耳 437,800円 (-※ZW)※3 片耳 247,500円 (-※Z)※3

※1 充電池交換＋クリーニングサービス (片耳16,500円、両耳33,000円(税込)) WH-G47、G45、R47、R45には、1回分の無料チケットが付属しています。※2 [両耳]、[片耳]は補聴器・リモコン・充電ケース・キャリングケースのセット価格です。R4シリーズ ハイパワー (HP) にはオーダーメイドイヤチップWH-PF17が装着されます。(片耳 11,000円、両耳 22,000円(非課税)) ※3 品番の※には本体色が入ります。

充電式補聴器
ラインナップ 主な特長

R5・C5 充電式

G4・R4 充電式

B1・C1 電池式

J2・S 充電式ポケット型

A2 アナログポケット型

補聴器のかたち
主な機能

よく愛用いただくために

別売品

ラインナップ

15

●記載内容は2024年4月現在のものです。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2024年4月現在のものです。

16

電池式

耳かけ型 **B1** シリーズ

扱いやすく操作も
ラクラク



髪色や肌の色に合わせて選べる目立ちにくい3色



ローズグレー(-H) ブラウン(-T) ブラック(-K)







防水・防塵
国際保護等級
IP57

主な機能
P.22参照



適応難聴度
軽 中 高 重
50~90 dB HL

B1 シリーズ ラインナップ	騒がしい場面にも 自動適応できる プレステージ	アクティブなスタイルにも 合わせやすい ハイスpek	日常生活をカバーする スタンダード	ご予算に合わせた ベーシック
チャンネル数	16ch	12ch	9ch	6ch
おまかせシーンセレクト	6	6	—	—
メモリ数	4	4	3	2
メモリ切換え両耳連携	○	○	—	—
小さな音の強調	◎	○	○	○
環境騒音抑制	◎	○	△	△
誘導コイル	○	○	○	—

つながるリモコン /
リモコン対応
希望小売価格



WH-B17C

両耳 **853,600**円(電池付)
片耳 **426,800**円(電池付)

前方強調
環境適応型指向性

WH-B15C

両耳 **616,000**円(電池付)
片耳 **308,000**円(電池付)

前方強調
環境適応型指向性

WH-B13C

両耳 **396,000**円(電池付)
片耳 **198,000**円(電池付)

前方強調
環境適応型指向性

—

つながるリモコン /
リモコン非対応
希望小売価格

—

—

WH-B13A

両耳 **308,000**円(電池付)
片耳 **154,000**円(電池付)

前方強調
環境適応型指向性

WH-B12A

両耳 **215,600**円(電池付)
片耳 **107,800**円(電池付)

前方強調
環境適応型指向性

電池式 耳かけ型 **B1**シリーズ 重度難聴モデル

低域から高域までハイパワー



ローズグレー(-H)
ブラウン(-T)
ブラック(-K)

WH-B14B
希望小売価格
両耳 **484,000**円(電池付)
片耳 **242,000**円(電池付)

チャンネル数

9ch

メモリ数

3

小さな音の強調

○

環境騒音抑制

○

誘導コイル

○

防水・防塵
国際保護等級
IP57

主な機能
P.22参照




適応難聴度
軽 中 高 重
70~110 dB HL

電池式

オーダーメイド
耳あな型 **C1** シリーズ

世界でたったひとつの
オーダーメイド※1

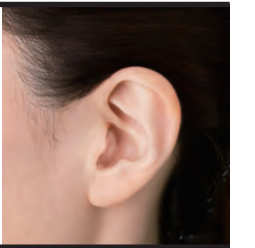

お一人おひとりの耳の形に合わせてお作りするから、
耳あなにフィットする、より自然な着け心地



耳型採取

主な機能
P.22参照



CIC (ミニ)
Complete in Canal

小型だから耳にすっぽり隠れて
目立ちにくい



適応難聴度
軽 中 高 重
~70 dB HL

ITC (カナル)
In the Canal

軽度~高度まで幅広く対応できる



適応難聴度
軽 中 高 重
~80 dB HL

ITE (コンチャ)
In the Ear

高度難聴の方におすすめな
高出力コンチャ



適応難聴度
軽 中 高 重
50~85 dB HL

C1 シリーズ ラインナップ	騒がしい場面にも 自動適応できる プレステージ	アクティブなスタイルにも 合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	16ch	12ch	9ch
おまかせシーンセレクト	6	6	—
メモリ数 ※5	4	4	3
小さな音の強調	◎	○	○
環境騒音抑制	◎	○	△

CIC (ミニ) 希望小売価格 	WH-M17A 両耳 814,000円(電池付) 片耳 407,000円(電池付)	WH-M15A 両耳 572,000円(電池付) 片耳 286,000円(電池付)	WH-M13A 両耳 396,000円(電池付) 片耳 198,000円(電池付)
ITC (カナル) 希望小売価格 	WH-C17A 両耳 814,000円(電池付) 片耳 407,000円(電池付)	WH-C15A 両耳 572,000円(電池付) 片耳 286,000円(電池付)	WH-C13A 両耳 396,000円(電池付) 片耳 198,000円(電池付)
ITE (コンチャ) 希望小売価格 	WH-F17A 両耳 814,000円(電池付) 片耳 407,000円(電池付)	WH-F15A 両耳 572,000円(電池付) 片耳 286,000円(電池付)	WH-F13A 両耳 418,000円(電池付) 片耳 209,000円(電池付)

お客さまの要望にあわせてきめ細かく応える豊富なオプションをご用意しています

マイク数※6 / 電池の種類※7 / ベント(通気孔)の種類 / 電源スイッチの種類※8 / メモリ切換えスイッチ※9



●乾燥ケースは、1個で両耳の補聴器(1セット)を収納できる仕様となっております。両耳でご購入の場合は、乾燥ケース1個が付属します。
※1 お一人おひとりの耳に合わせて作りますので、形状や部品配置が写真と異なる場合があります。 ※2、※4、※5 WH-M17A、M15A、M13Aを除く。 ※3 WH-M13A、C13A、F13Aを除く。
※6 1マイク仕様はWH-C17A、C15A、C13Aのみお選びいただけます。 ※7 PR48をお選びいただいた場合は、電源スイッチ無し・メモリ切換えスイッチ有りの1マイク仕様となります。
※8、※9 WH-M17A、M15A、M13Aを除く

充電式補聴器
ラインナップ
主な特長

充電式
R5・C5

充電式
G4・R4

電池式
B1・C1

充電式ポケット型
J2・S

アナログポケット型
A2

補聴器のかたち
主な機能


愛用いただくために

別売品

ラインナップ

充電式 ポケット型 J2S

誰にでも 使いやすいデザイン

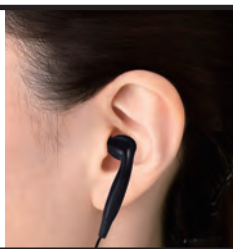

おうちの「聞こえ」をこの1台で、 まるごとサポート



おうち補聴器
つながるポケット
WH-J25D-S
希望小売価格
両耳 **140,800円**

こんな方におすすめ

テレビをもっと楽しみたい方に
一回の充電で約12時間視聴、テレビの楽しみを
充実サポート。

電話やドアホンが聞き取りやすい
ものがある方に
ワイヤレスでつながるから音声がよりキレイ、
補聴器で直接対応ができて便利。

使いやすいものがある方に
音量の調整が操作しやすいダイヤルボリューム、
スタンド式で充電も簡単。

適応難聴度

軽 中 高 重
～85 dB HL

チャンネル
数 **8ch** 両耳



**1年間
保証**

Bluetooth®&DECT準拠方式にダブル対応※1

電話の音が 聞き取りやすい



内線を使って 家族と話せる



来客が わかりやすい



テレビの音が キレイに楽しめる




接続可能なDECT対応製品一覧はこちら



おうちのテレビと ワイヤレスでつなげる!※1

テレビとの接続例

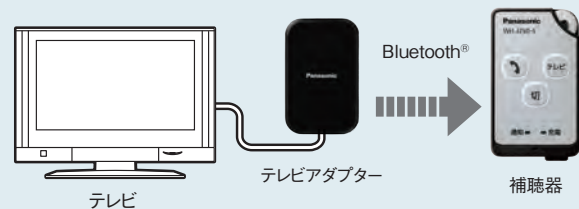

テレビが直接聞けるので周囲の雑音と混ざらず
音声がキレイ。

[別売品]
テレビアダプター
WH-0M1302J
希望小売価格 **16,940円**(税込)



※1 P.21～22の【無線機器使用上の注意事項】を参照。
※ J-DECTロゴは、DECT Forumの商標で、ARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。
● 上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2024年4月現在のものです。

使いやすさ・聞き取りやすさにこだわった充実の機能

音声ナビ & シンプル操作



気軽に使えるスタンド充電方式

面倒な電池の出し入れがなく簡単。
充電式なので経済的。

動作時間	補聴器として：約18時間 テレビ視聴：約12時間
充電時間	約4時間





動作時間
20%アップ!
(当社従来比)
—連続補聴動作:約18時間

・動作時間は、使用条件または補聴器の設定によって変わります。




左右を独立して補聴する 「ツインエンジン」

右耳用・左耳用それぞれに独立した2つの
ICチップを使用することでより高度な補聴
処理を実現します。

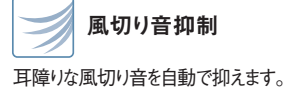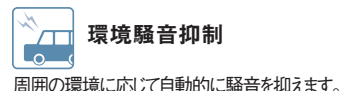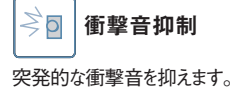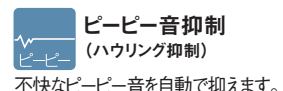

アナログ ポケット型 A2

操作が分かりやすく 手軽に使える

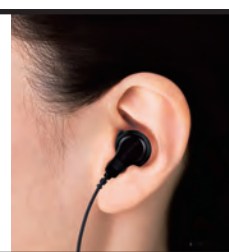

アナログでハイパワー



見やすい音量ダイヤル・
大きなスイッチで使いやすい

単3形ニッケル水素充電式
電池 (HR6) も使えて経済的※1、※2

低域も力強く表現するハイパワーで
重度難聴までカバーする高出力
(WH-A27)

マイクなどへの異物混入を防ぐ
下向きストラップ

WH-A27 在庫僅少
希望小売価格
片耳 **85,800円**(電池付)
総合支援法 推奨器種

適応難聴度
軽 中 高 重
70～110 dB HL

WH-A25 在庫僅少
希望小売価格
片耳 **63,800円**(電池付)
総合支援法 推奨器種

適応難聴度
軽 中 高 重
50～90 dB HL



※1 ニッケル水素充電式電池 (HR6) および充電器は本製品には付属していません。(単3形マンガン乾電池付属) ※2 補聴器本体では充電できません。


● 上記の補聴器は非課税です。記載内容は2024年4月現在のものです。

補聴器のかたち

聞こえのレベルやお好みにあった補聴器をお選びいただけます。

※ RIC (Receiver in Canal)：イヤホン(レシーバ)を補聴器本体から独立させて耳に入れるタイプの補聴器。

充電式オーダーメイド耳あな型

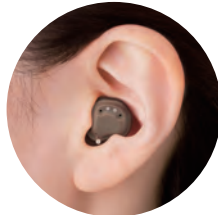

NEW
C5 シリーズ

こんな方におすすめ

- 耳の形にピッタリ合わせたい
- テレビを楽しみたい
- スマホが聞きやすいものがある

充電式耳あな型



G4 シリーズ

こんな方におすすめ

- 耳に着けやすいものがある
- 扱いやすいものがある
- テレビを楽しみたい

イヤホンユニット(HP)／イヤモールド
お一人おひとりの耳の形に合わせてお作りします。



充電式小型耳かけ型 (RIC※)



NEW
R5 シリーズ

こんな方におすすめ

- 目立たずオシャレなものがある
- テレビを楽しみたい
- スマホが聞きやすいものがある

耳かけ型



B1 シリーズ

こんな方におすすめ

- 電池式がいい
- 耳あか詰まりに強いものがある
- 扱いやすいものがある

充電式ポケット型



J2S

こんな方におすすめ

- 操作しやすいものがある
- テレビを楽しみたい
- 自宅の電話やドアホンとつなげたい



こんな方におすすめ

- ピーピーというハウリングを抑えたい
- 補聴器をしっかり耳に固定したい
- 補聴器の装着感を改善したい

デジタルの機能説明



ピーピー音抑制 (ハウリング抑制)
不快なピーピー音を自動で抑えます。



衝撃音抑制 (AGC) ※1
突発的な衝撃音を抑えます。



風切り音抑制 (IWS) ※2
耳障りな風切り音を自動で抑えます。



おまかせシーンセレクト
使用環境に合わせて補聴器が音質設定を自動調節します。



電池切れお知らせアラーム音
電池の消耗を音でお知らせします。



メモリ切換え両耳連携
補聴器本体の操作でメモリを切換えるともう片方の補聴器のメモリも自動で切換えます。



環境騒音抑制
周囲の環境に応じて自動的に騒音を抑えます。



前方強調
周囲の騒音を抑制し前方の音声を強調します。



小さな音の強調
遠くの音や小さな音の聞き取りやすさの調整が可能です。



外部ボリューム選択 (スマートボリューム)
電源のon/offのみのスイッチ式とボリューム式の選択ができます。



メモリ切換えスイッチ
好みに合わせて設定を切換えることができます。



誘導コイル
磁気誘導コイル対応の電話やヒアリングループからの音声を聞くことができます。

※1 Automatic Gain Control の略。 ※2 Intelligent Wind noise Suppressor の略。

アナログの機能説明



音質調整 (N-L)
高い音が気になる場合に、高音域の音を抑えます。



音質調整 (N-H)
低い音が気になる場合に、低音域の音を抑えます。



音量調整 (GAIN)
聴力に合わせて、適切な音量に調整します。



MT機能
誘導コイルの音と同時に周囲の音声も聞けます。



MTB回路
誘導コイルの音声と周囲で話す声との音のバランスを調整できます。



AIB回路
テレビケーブルなどからの音と、補聴器からの音のバランスを調整できます。



AGC回路
衝撃音をやわらげ、聞きやすい音量を保ちます。

選べるスイッチ



ボリュームスイッチ
音量調節＋電源の入・切をおこないます。



スライドOn/Offスイッチ
電池のフタのスライドで電源の入・切をおこないます。




On/Offスイッチ
レバー式で電源の入・切をおこないます。

無償修理保証

2年間保証 通常のご使用での自然故障に限り2年間無償で修理いたします。

1年間保証 通常のご使用での自然故障に限り1年間無償で修理いたします。

無線機器使用上の注意事項

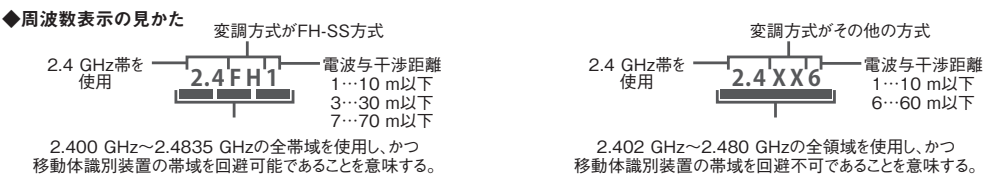

■WH-J25D-S、G4シリーズ、R4シリーズ、R5シリーズ、C5シリーズ、リモコン (WH-PM18、WH-PM19、WH-PM20、WH-PM20-T)、つながりリモコン (WH-OM1101J)、テレビアダプター (WH-OM1302J、WH-OM1303J、WH-PM1304J)、補聴器用AV送信機 (WH-OM1301J) の通信について

◆この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター (0120-045-285 (フリーダイヤル)) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。

◆これらの機器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍 (15 cm以内) で使用しないでください。

■WH-J25D-Sの通信について

◆Bluetooth® 対応機器と接続することで、ワイヤレス通信機能によりテレビや携帯電話などの音声を補聴でより明瞭に聞くことができます。ただし、すべてのBluetooth® 機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。 ■Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

■WH-J25D-Sと、電話・ファクス・ドアホンとの通信で使用する電波について

◆この機器には、1.9GHz帯 (1,895.616~1,902.528 MHz) を使用するデジタルコードレス電話の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク [1.9-D] が表示されています。

◆DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) はETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。

◆この機器の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター (0120-045-285 (フリーダイヤル)) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。

◆1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

大切な補聴器をずっと快適に ご愛用いただくために

補聴器に早く慣れるには、ちょっとしたコツがあります

毎日疲れない程度（30分～1時間）で1ヶ月は使い続け、
慣れてきたら使う時間を増やしましょう。

補聴器に
慣れるための
4ステップ


1 静かな場所で
自分の声を、
自分で聞いてみてください。



2 ご家族やお友だちと
静かな場所で
会話してみてください。



3 テレビのニュースを
まわりの人たちと同じ音量で
聞いてみてください。

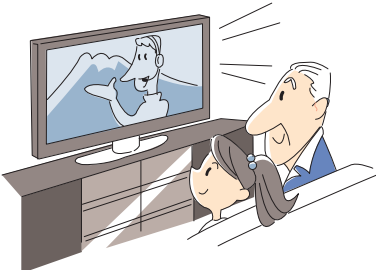

4 静かな場所で
4～5人の人と
話をしてみてください。



ご家族の協力も大切です

ご本人が補聴器を使いこなせるようになるまで、
あたたかな応援と協力をお願いします。
それがうれしい励みになります。



相手に注意を促し
顔を見て話しましょう。

意思を伝えるのに、
顔の表情や動作は
大切な役割を果たします。



ゆっくり、はっきり
話しましょう。

聞き取りやすいように、
丁寧な話し方で接します。



普通の大きさの声で
話しましょう。

補聴器が音を大きくするため、
大声はむしろ
聞き取りにくくなります。



言い回しをいろいろ変えて
話しましょう。

聞き取りにくいときは
同じ言葉を繰り返すより、
言い方を変える方が効果的です。




ご購入後に必要なこと

音質調整やメンテナンスを積み重ねていくことにより、お耳に合わせていきます。
より快適に長くお使いいただき、「聞こえるよこび」をご堪能ください。

補聴器のお掃除は
こまめに。



充電式の充電と
電池の交換時期を
お忘れなく。

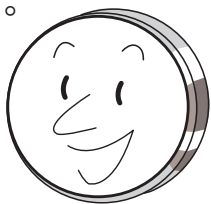

気になるときは
音質の調整をご依頼ください。



充電式補聴器
ラインナップ主な特長

充電式
R5・C5

充電式
G4・R4

電池式
B1・C1

充電式ポケット型
J2・S

アナログポケット型
A2

補聴器のかたち
主な機能

ご愛用いただくために

別売品

ラインナップ

別売品 補聴器をより快適に、使い続けていただくために

B1シリーズ用



耳かけハンガー
WH-PD1112J
希望小売価格 968円



チューブ 70cm:1本入り
WH-PE1100J
希望小売価格 242円



イヤチップ(クローズ)3個入り
小(S) WH-PB1123J
中(M) WH-PB1124J
大(L) WH-PB1125J
特大(LL) WH-PB1126J
希望小売価格 484円



イヤチップ(オープン)3個入り
小(S) WH-PB1119J
中(M) WH-PB1120J
大(L) WH-PB1121J
特大(LL) WH-PB1122J
希望小売価格 726円



イヤチップホルダー
WH-PC1100J
希望小売価格 363円



カラーリング
赤2個、青2個入り
WH-PZ1200J
希望小売価格 242円



乾燥ケース
(乾燥剤・スポンジ付)
WH-PG1205J
希望小売価格 2,420円



乾燥ケース用スポンジ
WH-PG1405J
希望小売価格 242円



乾燥剤 1個入り
WH-PZ1805J
希望小売価格 242円



キャリングケース
(シルバー)
WH-PG1301J
希望小売価格 2,420円



スリムチューブ
左 L0 WH-OE11L0J
左 L1 WH-OE11L1J
左 L2 WH-OE11L2J
左 L3 WH-OE11L3J
右 R0 WH-OE11R0J
右 R1 WH-OE11R1J
右 R2 WH-OE11R2J
右 R3 WH-OE11R3J
希望小売価格 1,210円



スリム用
イヤチップサポーター
WH-PL1105J
希望小売価格 242円



スリム用イヤチップ
(クローズ)1個入り
小(S) WH-PB1133J
中(M) WH-PB1134J
大(L) WH-PB1135J
希望小売価格 605円



(オープン)1個入り
小(S) WH-PB1110J
中(M) WH-PB1111J
大(L) WH-PB1112J
希望小売価格 605円



(ダブルドーム)1個入り
M WH-PB1136J
L WH-PB1137J
希望小売価格 605円



乾燥ケース用
スポンジ(旧タイプ)
WH-PG1402J
希望小売価格 242円



乾燥ケース用シリカゲル
(旧タイプ)(乾燥剤)1個入り
WH-PZ1801J
希望小売価格 242円



ブラシ
WH-PZ1703J
希望小売価格 1,452円



キャリングケース
WH-PG1314J
希望小売価格 2,178円

C1シリーズ用



乾燥ケース
(乾燥剤・スポンジ付)
WH-PG1205J
希望小売価格 2,420円



乾燥ケース用スポンジ
WH-PG1405J
希望小売価格 242円



乾燥剤 1個入り
WH-PZ1805J
希望小売価格 242円



キャリングケース(銀)
WH-PG1307J
希望小売価格 2,662円



ベントチップ
φ1.5〜3.0用
WH-PH1502J
希望小売価格 1,210円




ベントチップ
D=3.0〜4.5用
WH-PH1503J
希望小売価格 1,210円



ベントチップ
φ1.0-1.3用
WH-PH1500J
希望小売価格 363円



耳あかガード
(差込式)9個入り
WH-PH1305J
希望小売価格 1,210円

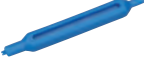

耳あかガード
交換ツール
WH-PH1350J
希望小売価格 605円



耳あかガード
(CIC(ミニ)用)10個入り
赤(右)WH-PH1301J
青(左)WH-PH1302J
希望小売価格 847円



(ITC(カナル)・ITE(コンチャ)用)9個入り
赤(右)WH-PH1303J
青(左)WH-PH1304J
希望小売価格 1,210円



乾燥ケース用スポンジ
(旧タイプ)
WH-PG1403J
希望小売価格 242円



乾燥ケース用シリカゲル
(旧タイプ)(乾燥剤)1個入り
WH-PZ1801J
希望小売価格 242円




ブラシ
WH-PZ1703J
希望小売価格 1,452円



ブラシ
WH-PZ1701J
(磁石付)
希望小売価格 847円



ドライバー
(CIC(ミニ)用)
WH-PZ1400J
希望小売価格 484円

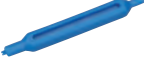

(ITC(カナル)・ITE(コンチャ)用)
WH-PZ1402J
希望小売価格 605円

J2/J2S用



マイク付イヤホン(1個入り)
(イヤチップアダプター付)
WH-J25D用
WH-PA1303J(約65 cm)
WH-J25D-S用
WH-PA1304J(約65 cm)
希望小売価格 19,360円



リチウムイオン電池※1
(1個入り)
WH-PK1302J
希望小売価格 6,050円



オーディオコード
(ステレオミニプラグ)(約1.5 m)
WH-PP1111J
希望小売価格 1,210円



オーディオコード
(ステレオミニプラグ+センプラグ)
(約1.5 m)
WH-PP1121J
希望小売価格 1,210円



テレビアダプター※2
(オーディオコード、
USB-USBminiケーブル、
ACアダプター付)
WH-0M1302J
希望小売価格 16,940円



USB-USBminiケーブル
WH-PK1402J
希望小売価格 1,089円



ACアダプター
WH-PK1203J
希望小売価格 3,146円



イヤチップ(クローズ)
1個入り
S WH-PB1104J
M WH-PB1105J
L WH-PB1106J
希望小売価格 605円



イヤチップ(オープン)
1個入り
S WH-PB1101J
M WH-PB1102J
L WH-PB1103J
希望小売価格 605円



イヤチップ(ダブルドーム)
1個入り
M WH-PB1107J
L WH-PB1108J
希望小売価格 605円



イヤチップアダプター
(左/右 各1個のセット品)
WH-PC1203J
希望小売価格 605円



ストラップ(クリップ付)
WH-P1JJZ102
希望小売価格 2,299円



キャリングケース
WH-P1JJG101
希望小売価格 1,694円



フィルター
WH-PJ1102J
希望小売価格 363円

※1 リチウムイオン電池、ニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。

※2 P.21～22【無線機器使用上の注意事項】を参照

イヤチップ一覧

		耳あな型		RIC 型		耳かけ型		ポケット型		耳かけ / ポケット 型	
		G4/G3 シリーズ用	こみみ用(レディメイド)	R5/R4 シリーズ用	R5/R4/R1 シリーズ用	B1 シリーズ用	B1 シリーズ スリム用	WH-J25D/J25D-S/105JJ 用	103JJ 用	アナログ機種用	
ダブルドーム	M	—	—	—	 WH-PB1107J 11 mm	—	 WH-PB1136J 11 mm	 WH-PB1107J 11 mm	—	—	
	L	—	—	—	 WH-PB1108J 13 mm	—	 WH-PB1137J 13 mm	 WH-PB1108J 13 mm	—	—	
クローズ	S	 —	 WH-PB1127J 9.6 mm	 —	 WH-PB1104J 7 mm	 WH-PB1123J 8 mm	 WH-PB1133J 7 mm	 WH-PB1104J 7 mm	 —	 WH-PB1123J 8 mm	
	M	 WH-PB1141J 9 mm	 WH-PB1128J 11.6 mm	 WH-PB1141J 9 mm	 WH-PB1105J 9 mm	 WH-PB1124J 9.2 mm	 WH-PB1134J 9 mm	 WH-PB1105J 9 mm	 WH-P1JJB104 9.2 mm	 WH-PB1124J 9.2 mm	
	L	 WH-PB1142J 11 mm	 WH-PB1129J 13.6 mm	 WH-PB1142J 11 mm	 WH-PB1106J 11 mm	 WH-PB1125J 11 mm	 WH-PB1135J 11 mm	 WH-PB1106J 11 mm	 WH-P1JJB105 11 mm	 WH-PB1125J 11 mm	
	LL	 WH-PB1143J 13 mm	 WH-PB1130J 15.6 mm	 WH-PB1143J 13 mm	—	 WH-PB1126J 12.6 mm	—	—	 WH-P1JJB106 12.6 mm	 WH-PB1126J 12.6 mm	
オープン	S	 —	—	 —	 WH-PB1101J 6 mm	 WH-PB1119J 8 mm	 WH-PB1110J 6 mm	 WH-PB1101J 6 mm	 —	—	
	M	 WH-PB1144J 8 mm	—	 WH-PB1144J 8 mm	 WH-PB1102J 8 mm	 WH-PB1120J 9.2 mm	 WH-PB1111J 8 mm	 WH-PB1102J 8 mm	 WH-P1JJB101 9.2 mm	—	
	L	 WH-PB1145J 10 mm	—	 WH-PB1145J 10 mm	 WH-PB1103J 10 mm	 WH-PB1121J 11 mm	 WH-PB1112J 10 mm	 WH-PB1103J 10 mm	 WH-P1JJB102 11 mm	—	
	LL	 WH-PB1146J 12 mm	—	 WH-PB1146J 12 mm	—	 WH-PB1122J 12.6 mm	—	—	 WH-P1JJB103 12.6 mm	—	

イヤチップを合わせてご確認ください。

右図のタイプは側面を合わせてご確認ください。



原寸大 サイズ (mm)

●上記別売品の希望小売価格は税込価格です。記載内容は2024年4月現在のものです。

●イヤホン・イヤチップ・アダプターなど別売品についての詳細は、販売店におたずねください。

充電式 補聴器
ラインナップ 主な特長

充電式
R5・C5

充電式
G4・R4

電池式
B1・C1

充電式
ポケット型
J2・S

アナログ
ポケット型
A2

補聴器のかたち
主な機能

愛用いただくために
ラインナップ

別売品

ラインナップ

ラインナップ

あなたにより適した補聴器が、きっとみつかります

タイプ	シリーズ		品 番	希望小売価格 (両耳)	使いやすさ		スペック								主な同 梱 物	販 売 名	一般的名称	医療機器認証番号						
					充 電 式	防水・防塵／撥水	チャンネル数	シーンセレクト数	メモリ数／モード数	適応難聴度	使用電池	電池寿命 (時間)	最大音響利得 (dB) [HFA-FOG]	90 dB入力最大出力音圧レベル (dB SPL) [ピーク値]					誘導コイル入力の最大感度 (dB) [HFA MASL]					
デジ タ ル	耳かけ型 充電式	R5シリーズ	NEW RIC 	WH-R59	¥1,200,000	○	防水・防塵 IP 68	24	おまかせシーン5	6	(M)軽度～高度 (HP)高度～重度	コイン型 リチウム 二次電池	連続補聴動作 約36 連続テレビ視聴 約12	(M)50 (HP)61	(M)120 (HP)130	-	・リモコン・充電ケース・ブラシ・USBケーブル ・ACアダプター・イヤホンユニット・イヤチップ※1 ・イヤチップサポーター※1・テレビアダプター (WH-R53を除く)	R5 シリーズ	耳かけ型 補聴器	305AKBZX00040000				
				WH-R57	¥898,000			20	おまかせシーン5	5														
				WH-R55	¥698,000			16	おまかせシーン4	4														
				WH-R53	¥498,000			12	-	3														
	耳あな型 充電式	(オーダーメイド) C5シリーズ 	WH-C59	¥1,224,000	○	防水・防塵 IP 68	24	おまかせシーン5	6	(M)軽度～高度 (HP)高度～重度	コイン型 リチウム 二次電池	連続補聴動作 約28 連続テレビ視聴 約10	(M)57 (HP)62	(M)126 (HP)130	-	・リモコン・充電ケース・ブラシ・USBケーブル ・ACアダプター・テレビアダプター (WH-C53を除く) ・ベントチップ (サイズに合わせて同梱)	C5 シリーズ	耳あな型 補聴器	306AABZX00012000					
			WH-C57	¥922,000			20	おまかせシーン5	5															
			WH-C55	¥722,000			16	おまかせシーン4	4															
			WH-C53	¥522,000			12	-	3															
	耳あな型 充電式	G4シリーズ 	WH-G47	¥869,000	○	防水・防塵 IP 57	16	おまかせシーン5	5	軽度～高度	コイン型 リチウム 二次電池	連続補聴動作 約24 連続テレビ視聴 約8	42	111	-	・リモコン・充電ケース・キャリングケース・ソフトケース ・キャップ・ネックストラップ (両耳モデル用) ・イヤチップ・ブラシ・クリーニングクロス ・単4形アルカリ乾電池 (リモコン用)・USB-DCケーブル ・ACアダプター	G4 シリーズ	耳あな型 補聴器	230AIBZX00021Z00					
			WH-G45	¥649,000			12	おまかせシーン4																
			WH-G43	¥437,800			9	-	4															
	耳かけ型 充電式	R4シリーズ 	WH-R47	¥869,000	○	防水・防塵 IP 68	16	おまかせシーン5	5	(S)軽度～中等度 (M)軽度～高度 (HP)高度～重度	コイン型 リチウム 二次電池	連続補聴動作 (S) (M)約24 (HP)約20 連続テレビ視聴 (S) (M)約8 (HP)約4	(S)37 (M)50 (HP)61	(S)111 (M)120 (HP)130	-	・リモコン・充電ケース・キャリングケース・ブラシ ・単4形アルカリ乾電池 (リモコン用)・USB-DCケーブル ・ACアダプター・イヤホンユニット ・イヤチップ※1・イヤチップサポーター※1	R4 シリーズ	耳かけ型 補聴器	229AIBZX00029Z00					
			WH-R45	¥649,000			12	おまかせシーン4																
			WH-R43	¥437,800			9	-	4															
	ポ ケ ッ ト 型 充電式	J2S 	WH-J25D-S	¥140,800	○	-	8 両耳	-	-	軽度～高度	リチウムイオン 電池	連続補聴動作 約18 連続テレビ視聴 約12	57	125	-	・マイク付イヤホン・リチウムイオン電池・電源コード ・ACアダプター・充電台・フィルター・ストラップ ・イヤチップ・イヤチップアダプター	ポケット J2S	ポケット型 補聴器	302AKBZX00073000					
			耳あな型 C1シリーズ (オーダーメイド) 	CIC (ミニ)	WH-M17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせ シーン6	-	軽度～中等度	PR536	約135	42	114	-	・乾燥ケース (乾燥剤入り) ・キャリングケース (ブラシ入り) ・巾着袋 ●乾燥ケースは、1個で両耳の補聴器 (1セット) を 収納できる仕様となっております。 両耳でご購入の場合は、乾燥ケース1個が付属します。	おんわ C1	耳あな型 補聴器	225AIBZX00072Z00			
		WH-M15A			¥572,000	12																		
		WH-M13A			¥396,000	9			-															
		ITC (カナル)			WH-C17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせ シーン6	※2 4	軽度～高度	PR41/PR48	約230/約390	49	114	-							
					WH-C15A	¥572,000			12		3 ※2													
					WH-C13A	¥396,000			9		-											3 ※2		
ITE (コンチャ)				WH-F17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせ シーン6	※2 4	中等度～高度	PR48	約325	55	123	-								
				WH-F15A	¥572,000			12		3 ※2														
				WH-F13A	¥418,000			9		-							3 ※2							
耳かけ型		B1シリーズ 		WH-B17C	¥853,600	-	防水・防塵 IP 57	16	おまかせ シーン6	4	中等度～高度	PR48	約235	62	129	88	・乾燥ケース (乾燥剤入り) ・イヤチップ ・キャリングケース ・イヤチップホルダー ・カラーリング (赤・青) ・チューブ ・ブラシ					おんわ B1	耳かけ型 補聴器	225AIBZX00069Z00
				WH-B15C	¥616,000			12																
				WH-B13C	¥396,000			9	-	3	高度～重度		約230	69	137	95								
			WH-B14B	¥484,000																				
	WH-B13A		¥308,000	中等度～高度							約300		62	129	88									
	WH-B12A		¥215,600					6	-	2														
アナログ	ポ ケ ッ ト 型	総合支援法 推奨器種 	WH-A27	¥85,800 (片耳)	-	-	-	-	-	高度～重度	単3形マンガン乾電池 (R6P)/単3形アルカリ乾電池 (LR6)/単3形ニッケル水素充電式電池 (HR6)	約110/約220/ 約180	※3 73 71	※3 144 142	※3 104 103	・イヤチップ・イヤチップアダプター・イヤホン ・イヤホンコード・耳だれ防止フィルター・クリップ ・ストラップ・化粧ケース・単3形マンガン乾電池	ポケット A2	ポケット型 補聴器	227AIBZX00023Z00					
			WH-A25	¥63,800 (片耳)						中等度～高度		約115/約230/ 約200	※3 58 56	※3 133 131	※3 92 90									

・電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。 ・同梱物については、予告なしで変更する場合があります。
※1 イヤホンユニット (S)/(M)に付属。 ※2 メモリ切換えスイッチを選択した場合。 ※3 数値はマンガン乾電池およびアルカリ乾電池の場合。

日本工業規格JIS C5512:2015に基づいて測定、表示してあります。

ラインナップ
充電式補聴器
主な特長

R5・C5
充電式

G4・R4
充電式

B1・C1
電池式

J2・S
充電式
ポケット型

A2
アナログ
ポケット型

補聴器のかたち
主な機能

よく愛用いただくために

別売品

ラインナップ